

GUIA RÁPIDO DERMOVÁCUO

Preparar o equipamento:

Antes de cada sessão, deverá ser feito o ajuste na conexão da fonte de alimentação localizado atrás do equipamento, apertando-o para que não fique solto, proporcionando o funcionamento correto.

1. Conecte a fonte de alimentação elétrica na parte traseira do Dermovácuo e na rede elétrica (100-240V/60Hz).
2. Certifique-se que a área em torno da fonte de alimentação esteja livre.
3. Conecte a mangueira de 8mm na saída frontal do equipamento (e o respectivo acessório de aplicação).
4. Ligue o seu equipamento.




Programação no modo Pulsado

Passo 1 - Ligue o equipamento na chave liga e desliga, localizada na parte posterior do equipamento;

Passo 2 - Ajuste a pressão negativa desejada;

Passo 3 - Ajuste o modo pulsado, através das setas de seleção (↑ e ↓), programando o tempo de sucção e tempo de alívio.

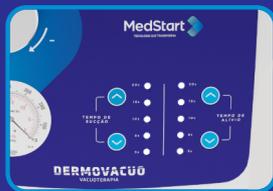

Programação no modo Contínuo

Passo 1 - Ligue o equipamento na chave liga e desliga localizado na parte posterior do equipamento;

Passo 2 - Ajuste a pressão negativa desejada;

Passo 3 - Após ajustar a pressão negativa, acople o aplicador desejado.

Obs.: No modo contínuo os LED's do ajuste do equipamento permanecerão desligados.

DERMOVÁCUO ACOMPANHA

OPÇÃO STANDARD:

- Cabo de alimentação elétrica;
- Kit facial - 5 aplicadores de vidro;
- Aplicador Endermo tipo sino com 2 roletes;
- Mangueira Cristal Transparente;
- Certificado de garantia;
- Certificado de assistência.

OPÇÃO PLUS:

- Cabo de alimentação elétrica;
- Kit facial - 5 aplicadores de vidro;
- Aplicador Endermo tipo sino com 2 roletes;
- Mangueira Cristal Transparente;
- Kit Pump, 2 ventosas glúteo;
- Kit Peeling de Diamante;
- Certificado de garantia;
- Certificado de assistência.



Aplicador Endermo

Auxilia na diminuição de aderências e fibroses, melhora o contorno corporal, o quadro de celulite e gordura localizada.



Kit Peeling de Diamante

Auxilia no tratamento de linhas de expressão, previne envelhecimento cutâneo, melhora o quadro de rugas e trata estrias.

Aplicadores de Vidro

Indicados para atenuar linhas de expressão, melhorar cicatrizes, rugas e estrias, assim como para extração de comedões.



Pump

Tem por objetivo modelar região de glúteos.

CONTRAINDICAÇÕES

- Hipertensão arterial não controlada;
- Gravidez;
- Tromboses e Flebites;
- Não aplicar sobre os olhos e ouvidos;
- Tumores e lesões cutâneas;
- Fragilidade vascular;
- Doenças infecciosas evolutivas.

INDICAÇÕES

Reabilitação pós queimadura, Auxilia na extração de comedões, Rejuvenescimento, Fibro Edema Gelóide (PEFE =FEG=Celulite), Estrias, Pré e pós-operatório, Cicatrizes, Flacidez cutânea em geral, Gordura localizada, Drenagem Linfática, Aderências, fibroses e Contorno corporal.

SEGURANÇA

Os acessórios, aplicadores e cabos descritos nestas instruções de uso são projetados e fabricados pela MedStart para uso somente com o equipamento Dermovácuo.

INSTALAÇÃO

Alimentação: BIVOLT AUTOMÁTICO (fonte 12V 7A)

Potência de entrada: 300 VA

Classe Elétrica: Classe I

Proteção Elétrica: Tipo BF

Pressão de trabalho negativa (0-600 mmHg)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

- O equipamento não liga! Certifique-se que:
- O equipamento está corretamente ligado na tomada?
 - A tomada está sendo alimentada com eletricidade?
 - O interruptor está ligado?

LIMPEZA

- Desligue o equipamento na fonte de alimentação.
- A limpeza do gabinete e dos acessórios pode ser realizada utilizando pano umedecido com detergente neutro.
- O procedimento de limpeza deve ser realizado sempre que necessário.
- Não coloque o equipamento ou cabos em líquidos.
- Recomendamos o uso de álcool com um pano seco.

CALIBRAÇÃO

O equipamento deve passar por manutenção periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil.



Seus
Treinamentos



Seu
Mídia Kit