

GUIA RÁPIDO ETHERNIA CLINIC

Preparar o equipamento:

Antes de cada sessão deverá ser feito o ajuste no cabo de força localizado atrás do equipamento, apertando-o para que não fique solto, evitando assim que queime componentes internos.

1. Conecte a fonte de alimentação elétrica na parte de trás do Ethernia Clinic e na rede elétrica (100-240V/60hz).
2. Certifique-se que a área em torno da fonte de alimentação esteja livre.
3. Ligue o seu equipamento no botão *ON/OFF* localizado na parte de trás.



Selecionando a Terapia

Ao ligar o equipamento você pode selecionar a terapia que vai usar, Eletroporação ou Radiofrequência.



Selecionando a frequência desejada

Se for escolhida a terapia de radiofrequência, será necessário selecionar a frequência a ser utilizada (650, 1200 ou 2400 kHz), basta apertar nas setas (*UP* e *DOWN*) até o valor desejado e pressionar *PLAY*.



Selecionando o tempo

Nessa tela selecione o tempo que a sessão vai durar no total. Você pode selecionar de 1 à 50 minutos, utilizando os botões para fazer essa seleção. Após ajustado aperte *PLAY* para prosseguir.



Ajustando as doses em modo de execução

A potência pode ser ajustada durante o funcionamento do equipamento, não necessitando estar em pausa.



Operação

Esta tela mostra vários valores que são constantemente atualizados para orientar o usuário sobre o estado da sessão. Nesta tela também é possível ajustar a potência a ser utilizada através das teclas *UP* e *DOWN*. O programa também pode ser pausado através do botão *STOP*.

Ajuste de potência conforme efeitos desejados

- Efeito Térmico: 80W a 120W - para tratamento de flacidez e gordura.
- Efeito Atérmico: 30W a 60W - para processos inflamatórios, celulite inflamatória e permeação de ativos.

Após a sessão, o Ethernia Clinic gera um sinal sonoro. Para voltar ao início da programação, basta selecionar a tecla *STOP/BACK*.

Aplicador de Radiofrequência

O aplicador do Ethernia Clinic é do tipo cambiável, podendo se tornar monopolar, bipolar ou tetrapolar apenas com a troca das ponteiros.



Ponteira Monopolar

A ponteira monopolar é indicada para aplicações corporais, e é utilizada em conjunto com a placa de retorno.




Ponteira Bipolar

Indicado para a região facial no tratamento de radiofrequência. Como possui duas polaridades não necessita da placa de retorno.

Ponteira Tetrapolar

É indicada para região corporal. Também não necessita de placa de retorno por ter duas polaridades.

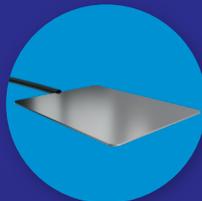

Placa de Retorno

Deve ser utilizada com a ponteira Monopolar do Ethernia Clinic. A posição da placa deve ser de acordo com a região e profundidade a ser tratada.

INDICAÇÕES

Gordura localizada, melhora na tonicidade da pele auxiliando no combate da flacidez, melhora a aparência da celulite, permeação de princípios ativos.

SEGURANÇA

Os acessórios, aplicadores e cabos descritos nestas instruções de uso são projetados e fabricados pela MedStart para uso somente com o equipamento Ethernia Clinic.

INSTALAÇÃO

Fonte Saída: 12V 10A Bivolt automático
Classe Elétrica: Classe I
Proteção Elétrica: TIPO BF

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Certifique-se que o equipamento está corretamente ligado na tomada. Se a fonte está ligada na eletricidade. E se o interruptor está ligado. Este equipamento é bivolt automático.

LIMPEZA

- Sugerimos que a limpeza do equipamento seja semanal. E o aplicador, seja limpo após cada sessão de tratamento;
- Tanto o equipamento quanto os cabos não devem ser molhados;
- Desligar o equipamento antes de higienizar.

CALIBRAÇÃO

O equipamento necessita manutenção periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil.



Seus
Treinamentos



Seu
Mídia Kit