

# GUIA RÁPIDO STIM MED

O Stim Med é um equipamento de correntes, indicado para fisioterapia e estética, possuindo 4 canais de trabalho e 8 eletrodos. Possibilita uma ampla aplicação. Abaixo são descritas os passos para a utilização do mesmo (leia o manual completo do equipamento).

- 1 Conecte a fonte de alimentação 12V 1A no Stim Med e ligue-o na tomada (fonte bivolt automática);
- 2 Conecte os cabos de correntes nas 4 saídas da parte superior do equipamento, conforme indicado;
- 3 Posicione os eletrodos de silicone no local de aplicação no corpo do paciente e então, pressione o botão *ON/OFF* na lateral do equipamento para ligá-lo;
- 4 Nos botões frontais do equipamento, selecione o protocolo desejado, assim como, tempo e outras opções de configuração;
- 5 Após o término da sessão, desligue o equipamento através do mesmo botão *ON/OFF* descrito no passo 3.

Materiais do seu equipamento



Acesse os treinamentos do Stim Med através do QRcode